

STILLE Scudi per Radiazioni

ImagiQ2 and Medstone – tavolo di imaging chirurgica – Accessori



Surgical perfection. For life.

La frequenza delle procedure interventistiche guidate da immagini continua ed aumenta la necessità di tecnologie e protezioni dalle radiazioni a basse dosi



STILLE ImagiQ2 Tavolo di Imaging Chirurgica



Kit Protezione anti raggi X (6 pannelli singoli) disponibili in grigio (535-1770) e blue (535-1771)



Sistema di Protezione anti raggi X (5 pannelli connessi) disponibili in grigio (535-1772) e blue (535-1773)

Evitare le radiazioni non necessarie

L'esposizione alle radiazioni continua a essere una delle maggiori preoccupazioni tra il personale clinico e la comunità dei pazienti. In base alle norme internazionali di sicurezza standard (BSS), esistono dispositivi che possono limitare i rischi nocivi dell'esposizione alle radiazioni. Anche una piccola dose di radiazioni aumenta leggermente il rischio di cancro, quindi, in base ai principi di ottimizzazione della protezione dalle radiazioni, l'esposizione deve essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente possibile

STILLE scudi per radiazioni

Gli schermi anti-radiazioni STILLE proteggono dalle radiazioni disperse. Rispettano le esigenze del singolo cliente e sono disponibili in diverse soluzioni; gli scudi sono fissati alle guide laterali o sul piano del tavolo mediante adesivo Velcro®. La gomma piombo (0,5Pb) all'interno dei pannelli impedisce alle radiazioni disperse di raggiungere i corpi inferiori e le gambe del personale ospedaliero, che spesso non sono protetti dalle radiazioni. Gli scudi sono facili da usare. Sono realizzati in PVC rinforzato ad alta frequenza, materiale che resiste al lavaggio con acqua e alla disinfezione con alcol. Un kit o sistema continuo coprirà solo un lato del tavolo. Per coprire entrambi i lati del tavolo sono necessari due scudi di protezione.

Kit di protezione anti raggi X STILLE 535-1770 (grigio) e 535-1771 (blue)

I kit di protezione STILLE sono progettati per essere montati sulla parte superiore del piano del tavolo e possono essere utilizzati con o senza guide laterali. I kit sono attaccati al piano del tavolo con strisce di adesivo Velcro® posizionate sul piano del tavolo. Ogni kit è composto da 2 pannelli speciali con ritaglio per le guide laterali e di 4 pannelli diritti senza ritaglio. Ogni pannello con ritaglio pesa circa 1,05 kg (2,3lbs) e quello senza ritaglio circa 0,85 kg (1,9lbs).



Sistema protettivo anti raggi X STILLE 535-1772 (grigio) e 535-1773 (blue)

Il sistema di protezione STILLE si aggancia alle guide laterali del tavolo con strisce in velcro®. Può anche essere agganciato al piano del tavolo usando strisce autoadesive in velcro®. Ogni scudo è composto da 5 pannelli protettivi fissati l'uno all'altro. Gli scudi possono essere attaccati facilmente nella posizione desiderata, anche durante il corso di un esame. Possono anche essere usati due scudi; ed è facile combinare questi scudi con kit di protezione o pannelli singoli. Il peso totale di ogni scudo è di circa 3,65 kg (8lbs) ed è di ca. 65 cm (25,59in) di larghezza.

Pannelli protettivi anti raggi X STILLE 535-1774 (grigio) e 535-1775 (blue)

Il pannello di protezione STILLE è un pannello singolo senza ritaglio che viene fissato al piano del tavolo mediante strisce adesive in Velcro®. Può essere utilizzato in combinazione con i kit di protezione e i sistemi di protezione. Si consiglia di utilizzare i pannelli sul lato corto del piano del tavolo. Un pannello ha un peso di ca. 0,85 kg (1,9lbs); ciascun pannello ha le dimensioni di 16x84cm (6,2x33pollici).



Dimensione del Sistema di Protezione STILLE - 535-1772 (grigio) - 535-1773 (blue)

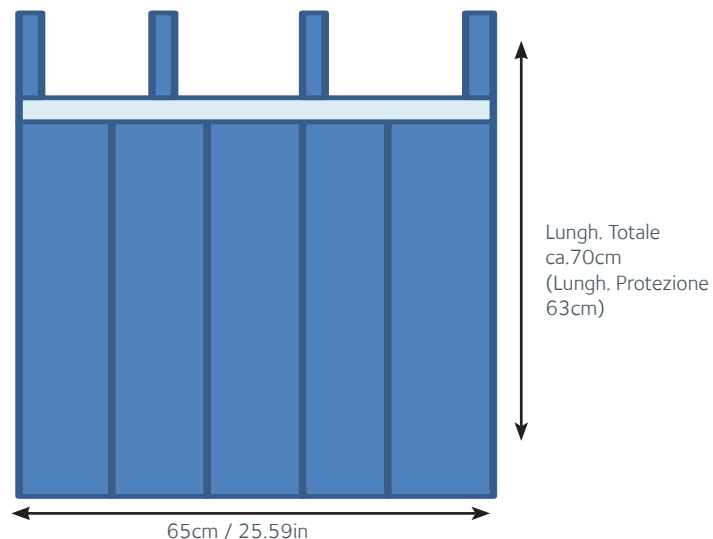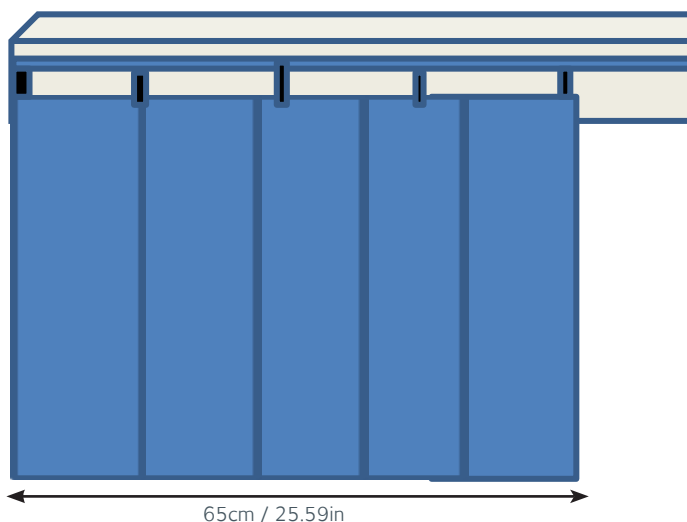

Dimensione del Kit di Protezione STILLE - 535-1770 (grigio) - 535-1771 (blue)

Pannelli di Protezione anti RX senza ritaglio
535-1774 (grigio) e 535-1775 (blue);
I Kits 535-1770 e 535-1771 contengono 4 pannelli

Pannelli di Protezione anti RX con ritaglio; I kits
535-1770 e 535-1771 contengono 2 pannelli.
Questi pannelli sono disponibili come parte dei kits

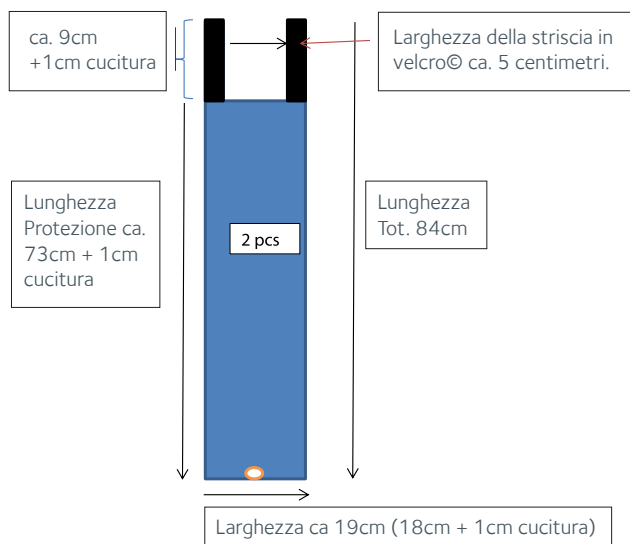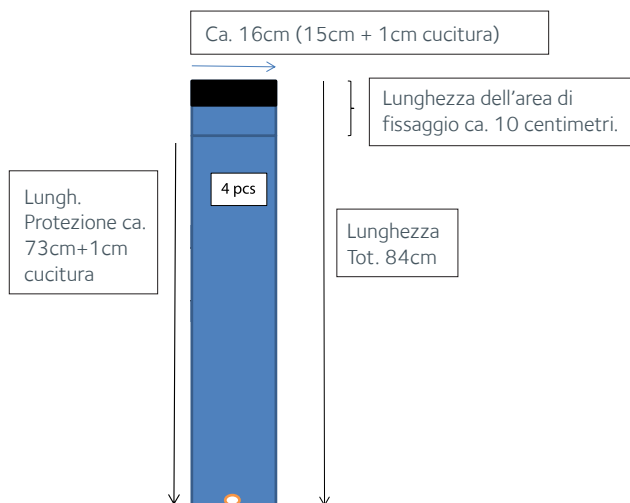

Specifiche Prodotto	Descrizione
Colore	Blue, Grigio
Livello di Protezione	Pb 0.5, piombo vinile
Materiale di Rivestimento	Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
Cucitura	Cucita ad alta frequenza

Modelli Scudo Radiazioni	Codice
Kit Protezione anti RX grigio	535-1770
Kit Protezione anti RX blue	535-1771
Sistema di Protezione anti RX grigio	535-1772
Sistema di Protezione anti RX blue	535-1773
Pannello Protezione anti RX grigio	535-1774
Pannello Protezione anti RX blue	535-1775



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Sweden
Phone: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
info@stille.se

STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
United States
Phone: 1.800.6651614

www.stille.se/imagiQ