

STILLE Escudos de radiación

mesa quirúrgica de imágenes imagiQ2 y Medstone – accesorios



Surgical perfection. For life.

La frecuencia de los procedimientos intervencionistas guiados por imágenes continúa y aumenta la necesidad de tecnologías y protecciones contra la radiación a bajas dosis.



STILLE imagiQ2 mesa quirúrgica de imágenes



Kit de protección contra rayos X (6 paneles individuales) disponible en gris (535-1770) y azul (535-1771)



Circuito protector de rayos X (5 paneles conectados) disponible en gris (535-1772) y azul (535-1773)

Evitar radiaciones innecesarias

La exposición a la radiación sigue siendo una preocupación importante entre el personal clínico y la comunidad de pacientes. De acuerdo con la normativa internacional de Seguridad Básica (BSS), existen componentes de estos quirófanos que pueden limitar los riesgos nocivos de la exposición a la radiación. Incluso una pequeña dosis de radiación aumenta ligeramente el riesgo de cáncer, por lo que, basándose en los principios de la optimización de la protección radiológica, la exposición a la radiación debe mantenerse tan baja como sea razonablemente posible.

Cortinas protectoras de radiación STILLE

Las cortinas protectoras de radiación STILLE bloquean la radiación dispersa. Están totalmente adaptadas a las necesidades de cada cliente. Hay varias soluciones disponibles; las cortinas se fijan a los rieles laterales o a la superficie de la mesa con velcro adhesivo®. La goma de plomo (0.5Pb) dentro de los paneles evita que la radiación dispersa llegue a la parte inferior del cuerpo y a las piernas del personal del hospital, que a menudo quedan desprotegidas de la radiación. Las cortinas protectoras son fáciles de usar. Están fabricadas con soldadura de alta frecuencia, reforzado con plástico PVC, un material que resiste el lavaje con agua y la desinfección con alcohol. Un kit o circuito cubrirá sólo un lado de la mesa. Para cubrir ambos lados de la tabla se necesitan dos elementos de protección contra la radiación.

STILLE kits de protección contra rayos X 535-1770 (gris) y 535-1771 (azul)

Los kits de protección STILLE están diseñados para ser montados en la parte superior del tablero y pueden ser utilizados con o sin rieles laterales. Los kits se fijan al tablero con bandas adhesivas de Velcro® que se colocan sobre la superficie de la mesa. Cada kit consta de 2 paneles especiales con recorte para las abrazaderas de los rieles laterales y de 4 paneles rectos sin recorte. Cada panel con recorte pesa alrededor de 1.05kg (2.3lbs) y el panel sin recorte aproximadamente 0.85kg (1.9lbs).


Circuito de protección contra rayos X STILLE 535-1772 (gris) y 535-1773 (azul)

Los circuitos de protección STILLE se fijan a los rieles laterales de la mesa con bandas de Velcro®. También se pueden fijar al tablero de la mesa con bandas autoadhesivas de Velcro®. Cada circuito consiste en 4 paneles de protección que se fijan entre sí. Los circuitos pueden colocarse rápidamente en la posición deseada de la mesa, incluso en medio de un procedimiento de exploración. También se pueden usar dos circuitos conjuntamente; y es fácil combinarlos con kits de protección o paneles individuales. El peso total de cada circuito es de aproximadamente 3.65kg (8lbs) y tiene aproximadamente 65cm (25.59in) de ancho.

Paneles individuales de protección contra rayos X STILLE 535-1774 (gris) y 535-1775 (azul)

El panel de protección STILLE es un panel único sin recorte que se fija al plano de la mesa con velcro autoadhesivo®. Se puede utilizar en combinación con los kits de protección y los circuitos de protección. Se recomienda utilizar los paneles del lado corto del tablero de la mesa. Un panel tiene un peso de aprox. 0.85kg (1.9 lbs); las dimensiones de cada panel son 16x84cm (6.2 x33in).


Dimensiones de los lazos de protección contra rayos X STILLE 535-1772 (gris) y 535-1773 (azul)

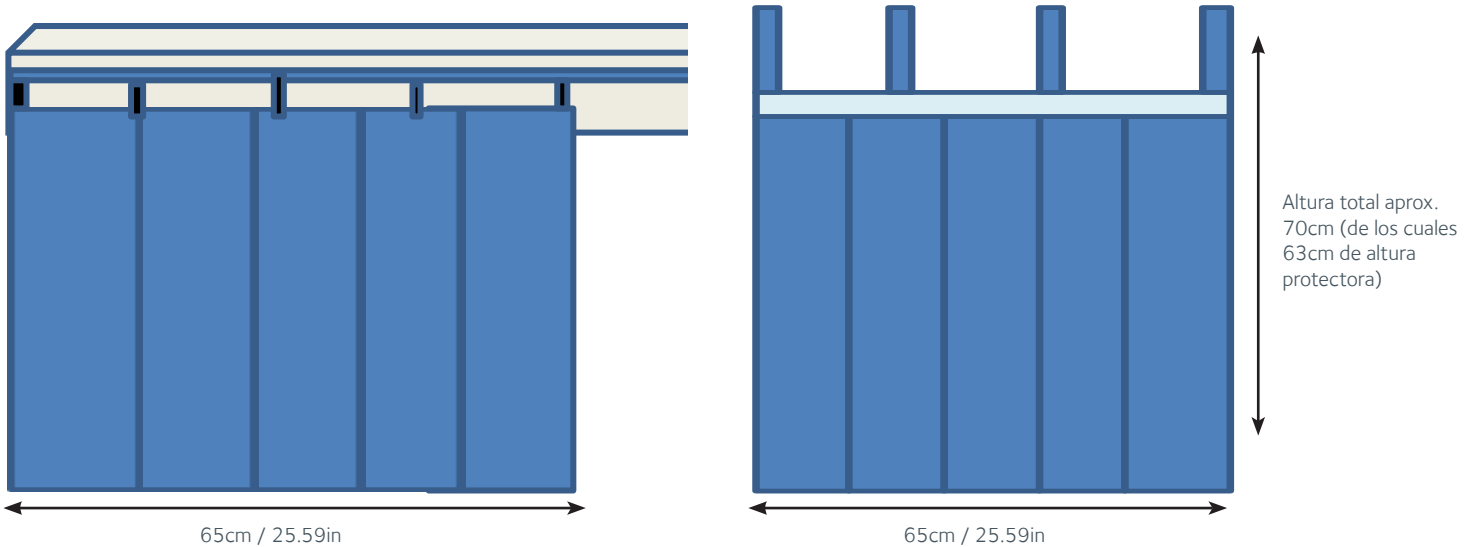

Dimensiones de los kits de protección contra rayos X STILLE 535-1770 (gris) y 535-1771 (azul)

Panel de protección contra rayos X sin recorte 535-1774 (gris) y 535-1775 (azul); los kits 535-1770 y 535-1771 contienen 4 de estos paneles.

Panel de protección contra rayos X con recorte; los kits 535-1770 y 535-1771 contienen 2 de estos paneles. Estos paneles sólo están disponibles como parte de los kits.

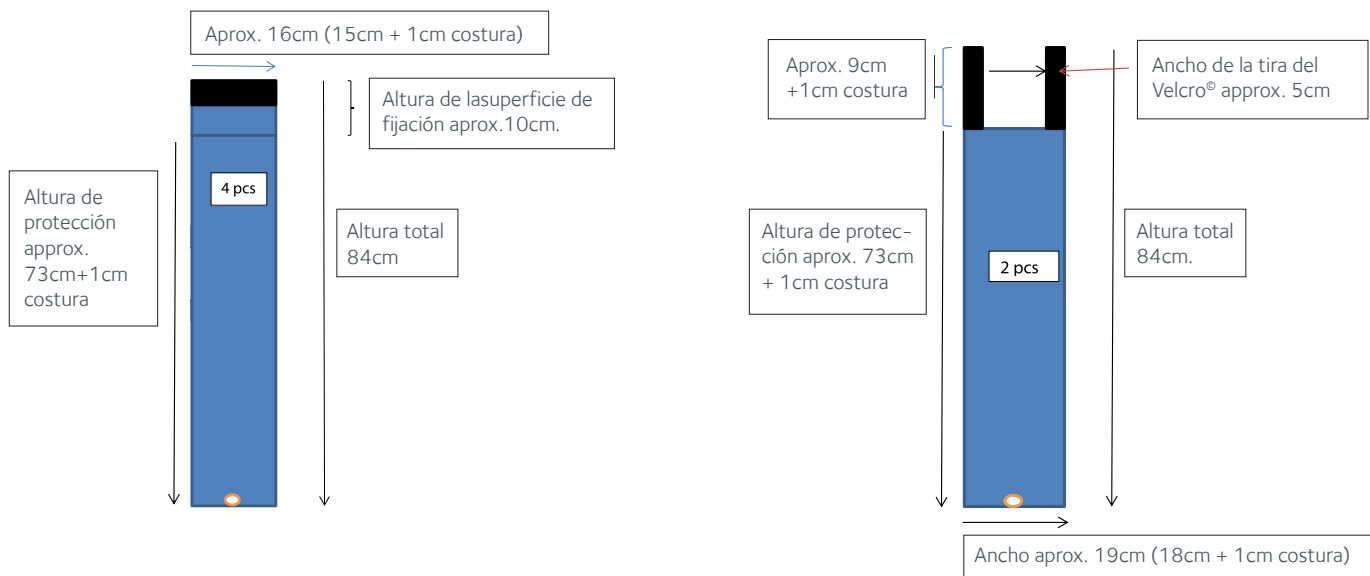

Especificaciones de producto	Descripción
Elección de colores	Azul, Gris
Grado de protección	Pb 0.5, vinilo de plomo
Material de revestimiento	Tejido de poliéster recubierto de PVC
Costura	Cosido a alta frecuencia

Modelos de Escudo Radiológico	Código
Kit de protección contra rayos X gris	535-1770
Kit de protección contra rayos X azul	535-1771
Circuito protector contra rayos X gris	535-1772
Circuito protector contra rayos X azul	535-1773
Panel protector contra rayos X gris	535-1774
Panel protector contra rayos X azul	535-1775



Surgical perfection. For life.

STILLE AB

Ekbacken 11
SE-644 30
Torshälla, Suecia
Teléfono: +46 8 588 580 00
Fax: +46 8 588 580 05
info@stille.se

STILLE Surgical Inc.

915 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
Estados Unidos
Teléfono: 1.800.6651614

www.stille.se/imagiQ